

SDI

GS-80

AMÁLGAMA ADMIX ECONÔMICA
E DE ALTA RESISTÊNCIA



ECONÔMICO SEM FASE GAMA 2 AMÁLGAMA ADMIX

Amálgama admix, tecnicamente avançada, sem fase gama 2, a um preço acessível.

A alta resistência de GS-80 e sua discreta expansão quando aplicada, asseguram a longevidade da restauração e a satisfação do paciente.

Desde o seu lançamento, em 1986, cerca de 200 milhões de restaurações bem sucedidas foram realizadas com GS-80 em todo o mundo.

VARIAÇÃO
DIMENSIONAL
POSITIVA

ESCOLHA DE TAMANHO DAS
CÁPSULAS E TEMPO DE PRESA

ALTA RESISTÊNCIA
À COMPRESSÃO

EXCELENTE MANUSEIO

A consistência da mistura de GS-80, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa, asseguram que o resultado final da restauração esteja de acordo com as necessidades do profissional.



ULTRAMAT S

- Mistura exata e consistente
- Extremamente silencioso e com baixa vibração
- Simples de usar - apenas 3 botões
- Compatível com todas as cápsulas
- Fácil de limpar
- Identificador de baixa potência e função de desligar
- Bivolt




ALTA RESISTÊNCIA VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA

ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO


A alta resistência à compressão de GS-80 minimiza o risco de fratura da restauração. [1] Alta resistência à compressão assegura uma restauração resistente e durável.

FORÇA COMPRESSIVA @ 1 HORA [1]

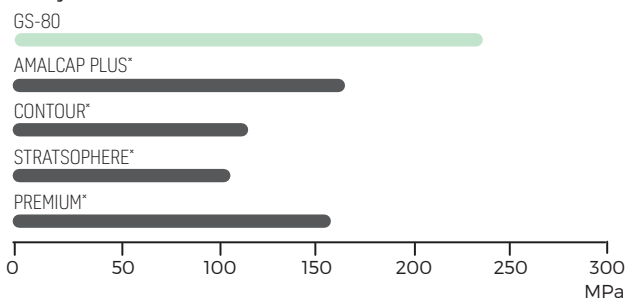

VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA

A variação dimensional positiva [expansão] de GS-80 assegura um excelente selamento nas margens. [1] Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório.

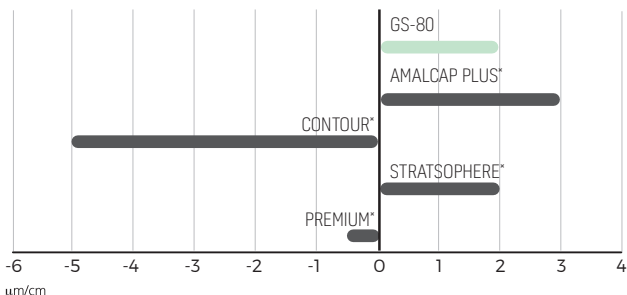


MAIS OPÇÕES DE TEMPO DE PRESA E DE QUANTIDADE DE PORÇÕES

O tempo de trabalho e presa permite que restaurações maiores sejam condensadas e esculpidas sem dificuldade.

TEMPO DE MANIPULAÇÃO E CONDENSAÇÃO

TEMPO DE ESCULTURA

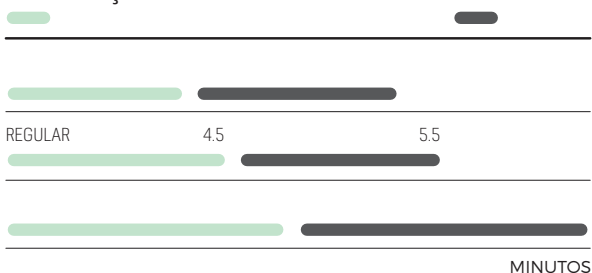


PROPRIEDADES FÍSICAS

| | |
|---------------------------------------|---|
| Composição: | Ag 40%, Sn 31.3%, Cu 28.7%, Hg 47.9% |
| Partículas: | Spherical and Lathe Cut |
| Resistência à compressão @ 1h: | 225MPa [32,625psi] |
| Resistência à compressão @ 24h: | 510MPa [73,950psi] |
| Resistência à tração diametral @ 1h: | 22MPa [3,190psi] |
| Resistência à tração diametral @ 24h: | 54MPa [7,830psi] |
| Creep estática @ 7 dias: | 0.1% |
| Alteração dimensional @ 24h: | +2µm/cm |

SISTEMA DE CÁPSULAS

O sistema de cápsula SDI é projetado para fornecer combinações consistentes e precisas a cada mixagem.

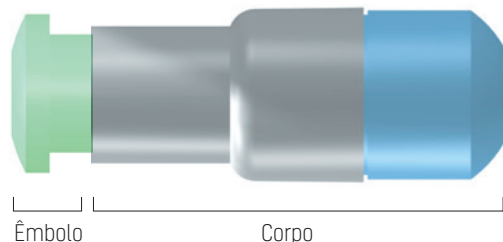

CÁPSULAS CONVENCIONAIS

A cor do êmbolo informa a quantidade de porções:




A cor da cápsula indica o tempo de cristalização:

REGULAR



DETALHES DO PEDIDO

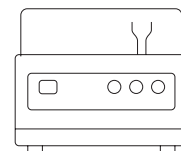

GS-80 CÁPSULAS

| | |
|---|-----------|
| GS 80 pacote com 50 cápsulas - 1 porção 400 mg | |
| Regular | 4411303BR |
| GS 80 pacote com 500 cápsulas - 1 porção 400 mg | |
| Regular | 4411323BR |
| GS 80 pacote com 50 cápsulas - 2 porções 600 mg | |
| Regular | 4412303BR |
| GS 80 pacote com 500 cápsulas - 2 porções 600 mg | |
| Regular | 4412323BR |
| EXCLUSIVO PARA LICITAÇÃO | |
| GS 80 T pacote com 50 cápsulas - 1 porção 200 mg | |
| Regular | 4400303BR |
| GS 80 T pacote com 500 cápsulas - 1 porção 200 mg | |
| Regular | 4420303BR |

EQUIPAMENTO

| | |
|---|---------|
| Ultramat S | 5546058 |
| (Todos os países - inclui cabo de energia para região que o produto será enviado) | |

TEMPO DE MISTURA

| | |
|------------------|-----------------|
| Ultramat S | |
| Velocidade | Fixa (4600 rpm) |
| 1, 2 & 3 porções | 8 ± 1 sec |
| 5 porções | 6 ± 1 sec |

As cápsulas GS-80 são certificadas com ISO 24234, ANSI/ADA Especificação nº1.
*Amalgap Plus, Contour, Stratosphere e Premium não são marcas registradas da SDI Limited.

[1] Source-Published e dados de teste da SDI.



SEU SORRISO.
NOSSA VISÃO.



SDI Brasil Industria e Comercio Ltda
Escritório Central
Av. Paulista, 2300 - Pilotis
Bela Vista, São Paulo - SP
CEP: 01310-300
Brasil DDC 0800 7701 735

T +55 11 3092 7100 F +55 11 3092 7101
brasil@sdi.com.au www.sdi.com.au



sdibrasil



facebook.com/
SDIBr



youtube/
SDI Brasil