

# SDI | ULTRAMAT S

VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ



# MUITO SIMPLES, UM BOTÃO PARA CADA FASE

Existem três opções de tempo, 6, 8 e 10 segundos para misturar os materiais encapsulados. A trituração pode ser interrompida ao pressionar estes botões durante a operação ou apenas ao se levantar a tampa.

## FÁCIL DE LIMPAR!

A superfície lisa do aparelho é higiênica, facilitando a limpeza e o controle de infecção. Esta superfície plástica não-porosa pode ser limpa com qualquer desinfetante dental.

## BAIXA VIBRAÇÃO E EXTREMAMENTE SILENCIOSO

Diferente de outros amalgamadores, o Ultramat S tem um ruído muito baixo. Apresenta uma vibração mínima assegurando que sua parte externa não se mova fazendo com que ele permaneça estável.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS CÁPSULAS

Apresenta garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contêm êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro).



# CARACTERÍSTICAS

## TRITURAÇÃO EXATA E CONSISTENTE

O Ultramat S tem um microprocessador interno que controla o tempo de oscilação, garantindo uma trituração mais exata e consistente.

## SAÍDA DE ALTA ENERGIA

A frequência do processo de trituração é de 4550 oscilações por minuto (+/- 1%), O Ultramat S garante a completa trituração de qualquer material, consumindo pouca energia.

## BI-VOLT

O Ultramat S opera nas voltagens entre 100-120 e 220-240V, 50 e 60Hz - sendo compatível com várias voltagens e frequências.

# 0-10

SEGUNDO  
MICROPROCESSADOR

# 4550

SEGUNDO  
MICROPROCESSADOR

# 120 & 240v

## VANTAGENS

Trituração exata e consistente

Extremamente silencioso e com baixa vibração

Simples de usar - apenas 3 botões

Compatível com todas as cápsulas

Fácil de limpar

Identificador de baixa potência e função de desligar

Garantia de 2 anos

Bi-volt

## DIMENSÕES

Largura	217mm	8.5"
Profundidade	173mm	6.75"
Altura	180mm	7.12"
Voltagem	120 / 240 volts	50 / 60 Hz
Peso	2.43kg	5.4lbs

## INDICADOR DE BAIXA POTÊNCIA E FUNÇÃO DE DESLIGAR

Caso haja uma queda de energia elétrica (a potência exigida pelo aparelho é de 100-120V e 220-240V), a luz azul que indica a potência irá piscar e o aparelho não irá funcionar até que seja fornecida a energia necessária. Isso previne que ocorra uma falha na mistura do material.

## TRAVA DE SEGURANÇA

O Ultramat S interrompe imediatamente a trituração ao levantar a tampa transparente.


## COMPATÍVEL COM TODAS AS CÁPSULAS

Apresenta garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro).

DENTAL DEVICE (CAPSULES)	TRITUARATION TIMES (SECONDS) USING ULTRAMAT S - SPEED SETTING: FIXED
Lojic+	6 ± 1
1, 2, 3 spill Permite / 1, 2, 3 spill GS-80 / Ultracaps+ / Ultracaps S	8 + 1
5 spill Permite / 5 spill GS-80	8 + 1
Riva Light Cure / Light Cure HV / Riva Self Cure (Regular and Fast) Riva Bond LC / Riva Protect / SeT / Riva Luting / Luting Plus /	10



## CÓDIGOS

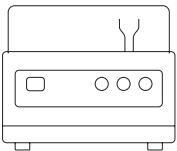

### EQUIPMENT

<b>Ultramat S</b> (All countries - includes power cord for the region the product is shipped to)	5546058
<b>Ultramat 2</b> (All countries - includes power cord for the region the product is shipped to)	5546052

\*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat S5, Wig-L-Bug, are not registered trademarks of SDI Limited.



YOUR SMILE. OUR VISION.



ACN 008 075 581



MADE IN AUSTRALIA  
by SDI Limited  
3-15 Brunsdon Street,  
Bayswater, Victoria 3153 Australia  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**AUSTRALIA** 1800 337 003  
**AUSTRIA** 00800 0225 5734  
**BRAZIL** 0800 770 1735  
**FRANCE** 00800 0225 5734  
**GERMANY** 0800 100 5759

**ITALY** 00800 0225 5734  
**NEW ZEALAND** +64 21 400 323  
**SPAIN** 00800 0225 5734  
**UNITED KINGDOM** 00800 0225 5734  
**USA & CANADA** 1 800 228 5166